

# SEVERO

## Broyeur de comprimés

- ✓ Simple, efficace et robuste
- ✓ Quasi silencieux
- ✓ Broyage sans effort ni risque de TMS
- ✓ Facilement nettoyable
- ✓ Léger et portable



# SEVERO broyeur de comprimés

Afin de faciliter la prise de médicaments, le personnel soignant doit régulièrement broyer les comprimés des patients ayant des troubles de la déglutition.

Pour éviter les troubles musculo-squelettiques dûs au broyage manuel, le broyeur électrique Severo® a été développé en collaboration avec des professionnels de santé.

Ce broyeur, déjà approuvé par de nombreux instituts, permet de réduire en une fine poudre les comprimés les plus durs, en moins de 8 secondes.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (LxPxH)	80 x 70 x 217 mm
Autonomie	500 cycles de broyage (≈ 3 jours d'utilisation en continu)
Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)	
Poids	≈ 1,5 kg
Niveau sonore	52 dB
Temps de chargement	2 heures
Garantie	2 ans pour l'appareil et 1 an pour la batterie



## Utilisation



- 1** Ouvrez le couvercle du Severo en appuyant sur le bouton métallique. Placez les médicaments dans le gobelet sans dépasser la première ligne.



- 2** Placez la tête de broyage sur le gobelet. Placez le gobelet avec la tête de broyage sur le plateau.



- 3** Fermez le couvercle du Severo en exerçant une légère pression. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le processus de broyage commence.



- 4** La LED du bouton passe au vert une fois le broyage terminé. Ouvrez le couvercle puis soulevez la tête de broyage.



- 5** Avant de lancer un nouveau broyage, essuyez la tête de broyage avec une lingette sèche à usage unique pour éviter la contamination croisée.



- 6** Les médicaments sont réduits en fine poudre et peuvent être mélangés aux repas des patients.

